

## Sie haben einen Kinderwunsch und es klappt einfach nicht?

Temperatur messen, fruchtbare Tage bestimmen, Sex nach Terminkalender: bei manchen Paaren klappt die Schwangerschaft trotz jahrelanger Sexbemühungen nicht. Dass auch Männer der Grund für den unerfüllten Kinderwunsch sein können, ist diesen nur selten klar. Oft wird die Ursache für ausbleibende Schwangerschaften zunächst bei der Frau vermutet, es ist allerdings erwiesen, dass 7 % aller Männer Fruchtbarkeitsprobleme haben und zu 1/3 mit daran schuld sind, wenn es zu keiner Schwangerschaft kommt.

Wertvolle Lebenszeit verstreicht, weil Paare oftmals zu lange abwarten oder ihr Heil ausschließlich in der gynäkologischen Beratung der Frau suchen.

Wir haben für Sie einen Spermientest entwickelt, mit dem Sie bequem zuhause im stillen Kämmerchen überprüfen können, wie es um Ihre Zeugungsfähigkeit steht. Der Test ist für alle leicht zugänglich (Apotheke, Online-Shop), wodurch Scham genommen und die Hemmschwelle gesenkt wird. FertiQUICK spricht also auch die Männer an, die normalerweise einen großen Bogen um jeden Arzt machen.

FertiQUICK kann frühzeitig den Weg zu gezielter Diagnostik und Therapie eröffnen und das Thema aus der Grauzone unangebrachter Befangenheit holen.

## Was ist FertiQUICK?

FertiQUICK ist ein Fruchtbarkeitstest für den Mann, mit dem man unkompliziert zuhause innerhalb von 20 Minuten feststellen kann, ob man zeugungsfähig ist. Dabei weist unser Fruchtbarkeitstest für den Mann die Spermienzahl im Ejakulat mit einer Zuverlässigkeit von > 97 % nach. FertiQUICK zeigt Ihnen an, ob:

1. Ihre Spermienzahl über 20 Millionen pro Milliliter Ejakulat liegt. Ist dies der Fall, gelten Sie laut Weltgesundheitsorganisation WHO als fruchtbar.
2. Ihre Spermienzahl über 5 Millionen pro Milliliter Ejakulat liegt. Ist dies der Fall, gelten Sie derzeit als wahrscheinlich unfruchtbar, es könnte aber sein, dass Ihre Spermienzahl im Moment aufgrund von Stress, starkem Rauchen oder einer Geschlechtskrankheit so niedrig ist und sie sich wieder stabilisiert, wenn Sie in einer besseren körperlichen und seelischen Verfassung sind.
3. Ihre Spermienzahl unter 5 Millionen pro Milliliter Ejakulat liegt. Ist dies der Fall, ist die Wahrscheinlichkeit, ein Kind zeugen zu können, sehr gering.




### Schritt 1

Fangen Sie Ejakulat im beigefügten Becher auf. Am besten eignet sich Ejakulat aus reiner Masturbation. Füllen Sie die beiliegende Pipette mit Ejakulat.


### Schritt 2

Geben Sie nun das Ejakulat in das entsprechende Lösungsgefäß.

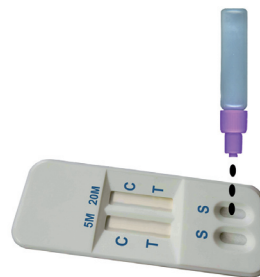

### Schritt 3

Bringen Sie nun das Lösungsgemisch auf die dafür vorgesehene Test-Kassette auf.

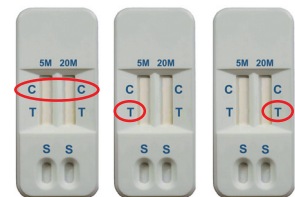

### Schritt 4

Lesen Sie das Testergebnis nach 7 Minuten ab.