

MenoQUICK®

Menopausen-Schnelltest

»Meine neue Lebensphase. Jetzt!«

Hormone in der Pause – Bin ich in den Wechseljahren?

Sie haben bei sich in letzter Zeit vermehrt auffällige Symptome wie längeres Ausbleiben der Periode, Hitzewallungen oder Bläsenschwäche bemerkt? Sie sind in den 40ern? Dann könnte es gut sein, dass Sie am Beginn oder gar schon mitten in den Wechseljahren stehen.

Was genau sind eigentlich die Wechseljahre?

Die Wechseljahre (auch: Menopause) stellen das Ende der Fruchtbarkeit einer Frau dar. Frauen können auf natürlichem Weg jetzt keine Kinder mehr zur Welt bringen. Ähnlich wie schon die Pubertät oder auch eine Schwangerschaft geht auch die Menopause mit einigen hormonellen Änderungen einher. Hierdurch kann es zu verschiedenen Beschwerden kommen, muss es aber nicht: Jede 3te Frau merkt überhaupt nicht, dass sie schon länger in den Wechseljahren ist.

Warum es wichtig ist, Bescheid zu wissen...

Die neue Phase Ihres Lebens steht auch für Veränderung. Sie müssen sich nicht länger um Verhütung kümmern und können Sexualität anders genießen als mit Anfang 20. Doch wie jeder neuer Lebensabschnitt, können auch die Wechseljahre Komplikationen bedeuten. So erkranken etwa 20% der Frauen mit Eintritt der Menopause und dem daraus entstehenden Hormonmangel an Osteoporose („Knochenschwund“). Wenn Sie wissen, dass Ihre Wechseljahre eingetreten sind, können Sie mit einem Gynäkologen Ihres Vertrauens über eine gezielte Hormonersatztherapie sprechen. Durch eine frühzeitige Substitution mit Östrogenen zu Beginn der Menopause kann eine spätere Osteoporose-Erkrankung verhindert werden.

Wie kann ich die Wechseljahre feststellen?

Die Wechseljahre können Sie mit MenoQUICK® schnell, sicher und völlig bequem im privaten Rahmen zuhause nachweisen.



www.menoquick.de

www.menoquick.de


Wechseljahre einfach feststellen

Schritt 1

Sammeln Sie im beiliegenden Testbecher etwas Urin.


Schritt 2

Nehmen Sie mithilfe der Pipette 3 Tropfen Urin aus dem Becher und geben Sie sie auf das Anwendungsfeld der Testkassette.

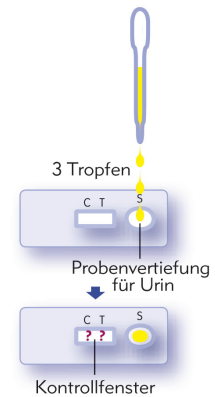

Schritt 3

Der Test ist aktiviert, sobald sich eine leicht rötliche Verfärbung im Test- und Kontrollfeld einstellt.

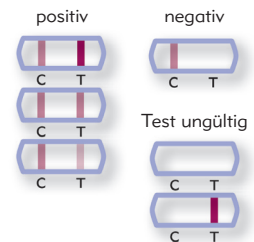

Schritt 4

Lesen Sie das Testergebnis nach 5 Minuten ab.



MenoQUICK®

Menopausen-Schnelltest

»Meine neue Lebensphase. Jetzt!«