

ab 8,95 € erhältlich



GraviQUICK® halten wir in 3 verschiedenen Packungsgrößen für Sie bereit: mit 3 Testkarten, 2 Testkarten oder 1 Testkarte.

In Ihrer Apotheke

(PZN 3er: 0563861, PZN 2er: 0541730, PZN 1er: 0539035)


Im Internet-Shop unter:

www.graviquick.de

So einfach ist sicher sein:

Ein Test ist ab dem 1. Tag des Ausbleibens Ihrer Periode möglich.

- Etwas Urin in einem sauberen Becher sammeln.
- Mit der Pipette 3 Tropfen Urin in die Probenvertiefung der Testkarte geben – Zeitmessung starten.
- Test ist bei schwacherer Fließbewegung über die Test- und Kontrolllinie aktiviert. Ergebnis nach 3 Minuten im Kontrollfenster ablesen.

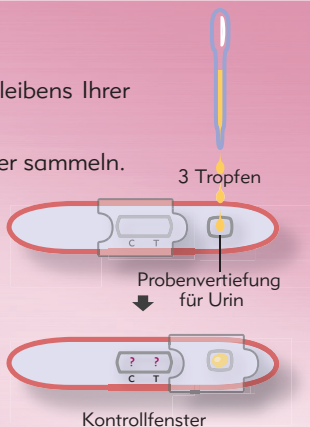

NanoRepro AG
Untergasse 8
35037 Marburg
www.nano.ag



Dem Leben zuliebe.

