

Ab 21,95 € erhältlich

Familienplanung. Ihr Wunschkind braucht Gewissheit.

Der Wunsch nach einem eigenen Kind ist die natürlichste Sache der Welt. Aber dennoch eine Entscheidung, die so gründlich bedacht werden sollte wie die Zukunft, in die Ihr Kind glücklich und gesund hineinwachsen soll.

Sicherheit braucht Planung. Vor allem Sie können entscheiden, wenn Sie Ihr individuelles Zeitfenster für die Empfängnis kennen. **Testen, wissen, planen: Mit OvuQUICK®.**

Ganz natürlich. Und doch immer wieder ein Wunder.

Von mehr als 20 Millionen Samenzellen schaffen es weniger als 1000 bis in die Eileiter. Treffen die überlebenden Spermien innerhalb von etwa 24 Stunden nach dem Eisprung auf eine Eizelle, so wird eine Befruchtung möglich. Hoffen Sie nicht auf ein Wunder. **Sie allein bestimmen den Zeitpunkt: Mit OvuQUICK®.***

*in 99% aller Fälle nachgewiesen

Schwangerschaft. Wissen ist sicherer als warten.

Nur während eines engen Zeitraums nach dem Eisprung kann Ihre Eizelle auf befruchtungsfähige Samenzellen treffen, wo sie mit einer einzigen zur Keimzelle verschmilzt. Diese teilt sich dann mehrfach und wandert durch den Eileiter in die Gebärmutter, wo sich das Zellpaket im Zusammenspiel der Hormone einnistet. **Geben Sie Ihrem Glück eine Chance: Mit OvuQUICK®.**

Eisprung. Kommt Zeit, kommt Test.

Ihr Körper bildet einmal pro Monatszyklus eine reife Eizelle. Nach dem Eisprung bleibt die Eizelle für etwa 24 Stunden befruchtungsfähig.

Der günstigste Zeitraum für die Erfüllung Ihres Kinderwunsches beginnt zwei Tage vor dem Eisprung und endet einen Tag danach. Der einfach und zuverlässig messbare Anstieg eines bestimmten Hormons (LH) signalisiert Ihren Eisprung. **Eisprung sicher selber testen: Mit OvuQUICK®.**

Warten. Kein Problem, wenn man weiß, worauf.

Die Wahrscheinlichkeit für eine Schwangerschaft liegt pro Monatszyklus allgemein bei höchstens 30 Prozent. Ein Drittel aller Frauen wartet länger als ein Jahr auf eine Schwangerschaft. Zudem entwickeln sich die meisten befruchteten Eizellen (ca. 70%) nicht weiter. Sie gehen oftmals unbemerkt während der Menstruation ab. **Wissen heißt gelassen warten: Mit OvuQUICK®.**



OvuQUICK® halten wir in 2 verschiedenen Packungsgrößen für Sie bereit: 5 Tests für 1 Zyklus, 10 Tests für 2 Zyklen.

In Ihrer Apotheke

(PZN 5er: 1414784, PZN 10er: 1410786)

Im Internet-Shop unter:

www.ovuquick.de

OvuQUICK® auf einen Blick:

SICHER:

Zuverlässiges Ergebnis (>99%)

UNKOMPLIZIERT:

Keine Verschreibungspflicht

HANDLICH:

Einfaches Anwendungs-Prinzip zu Hause

SCHNELL:

Maximal 10 Minuten pro Test-Tag

PREISLEISTUNGSSTARK:

Spitzenprodukt zum attraktiven Preis

Einfach, schnell und sicher selber testen!

Halten Sie zunächst einige Monate lang die Dauer Ihres Zyklus im Kalender fest. Bei unregelmäßigem Zyklus gilt der kürzeste, den Sie innerhalb der letzten Monate notiert haben. In unserem Beispiel handelt es sich um einen 28-Tage-Zyklus. Sie müssen also 9 Tage nach der Menstruation mit dem Testen beginnen.

Dauer des Menstruationszyklus																																						
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	4	5	6	7	8	9	9	9	10	10	10	12	13	14	15	16	17	18	19
zu zählender Tag																																						


Kalenderbeispiel:

Son	Mon	Dien	Mittw	Don	Frei	Sam
	1	2	(3)	4	5	6
7	8	9	10	<11>	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

() Erster Tag der letzten Periode <> Testbeginn

Beispiel: Letzte Monatsblutung begann am (3). Ab dem (3). (einschließlich) 9 Tage bis zum <11>. abzählen. An diesem Tag beginnt Ihr Test.

- Urin im Packungsbecher sammeln.
- Mit Pipette drei Tropfen Urin in die Probenvertiefung der Test-Kassette geben. Zeitmessung starten.

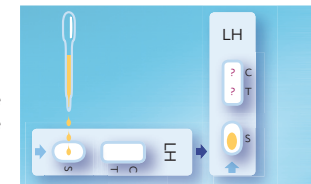

- Fließt die Urinprobe schwachrot über die Kontrolllinien, beginnt der Test. Lesen Sie das Ergebnis nach 5-8 Minuten ab. Evtl. länger (max. 10 Minuten) abwarten und den Test zum Vergleich in der Testbox aufbewahren.

So können Sie sich ganz sicher sein: Klare Testergebnisse.



Positiv: Wenn zwei farbige Linien sichtbar werden und die Testlinie (T) gleich oder dunkler ist als die Kontrolllinie (C). Dies zeigt an, dass Sie wahrscheinlich in den nächsten 24-36 Stunden eine Ovulation haben werden. Wenn Sie während der nächsten 24 Stunden Geschlechtsverkehr haben, ist Ihre Chance, schwanger zu werden, am Größten. Sie können das tägliche Testen für diesen Zyklus jetzt beenden.



Negativ: Wenn zwei farbige Linien sichtbar werden, aber die Testlinie (T) heller ist als die Kontrolllinie (C) oder keine Testlinie vorhanden ist. Dies zeigt an, dass kein LH-Anstieg nachgewiesen worden ist und das tägliche Testen fortgesetzt werden sollte.



Ungültig: Es erscheint keine Kontrolllinie. Das Ergebnis ist ungültig, wenn keine farbige Linie im Kontrolllinien-Bereich (C) erscheint. Verfahrensablauf überprüfen und den Test mit einer neuen Test-Kassette durchführen.